

EL DISEÑO AL SERVICIO DE LA FUNCION con COMPOSI-TIGHT 3D™

Los sistemas de matriz seccional de GARRISON son imbatibles para los contactos predecibles en composites posteriores y Composi-Tight establece el estándar de calidad a nuevas alturas.

Composi-Tight 3D representa 11 años de liderazgo avanzando en el arte de las restauraciones posteriores de composite. El resultado en clínica serán unos puntos contactos mejores, más predecibles y preciosos. Es el sistema más fácil, más rápido y más flexible que se haya presentado hoy.

5
EXTREMADAMENTE FUERTE, NO SE ESTIRA

2
FIRME NÚCLEO SEPARA LOS DIENTES

4
PUNTAS AMPLIAS PARA PREPARACIONES AMPLIAS

1
3D SOFT FACE™ ELIMINA EL DESLUMBRAMIENTO

3
SE ADJUSTA DIRECTAMENTE SOBRE LA CUÑA

SISTEMA ADAPTABLE DE 2 ANILLOS:

El sistema de Matriz Seccional Composi-Tight 3D™ esta diseñado para crear contactos ajustados y anatómicos en las restauraciones de composite de clase I, II y MOD.

Las bandas matrices contorneadas proporcionan una anatomía del diente perfecta, al tiempo que, los dos tipos de anillos proporcionan la separación necesaria y la adaptación de la banda para formar un punto de contacto natural.

SOFT FACE™ 3D-RING

El anillo Soft Face™ 3D naranja se utiliza en muchas ocasiones debido a la facilidad de colocación y su facilidad para adaptarse a una gran variedad de anatomías dentarias al tiempo que reduce el deslumbramiento y proporcional el contorno apropiado.

THIN TINE G-RING®

El G-Ring® delegado y fino se utiliza en algunas situaciones en las que la forma de la dentición no permite utilizar el anillo 3D de superficie suave contorneado (naranja) que se coloca firmemente alrededor del diente, como en las superficies distales de los caninos. En estas condiciones, los extremos brunidos del anillo G fino y delgado, se adaptan mucho mejor y se retiene mas eficazmente. Este anillo es también el preferido para dientes en mala posición y en odontología pediátrica.




LAS CLASES II SON MÁS FACILES CON COMPOSI-TIGHT 3D™

DESAPARECE EL DESLUMBRAMIENTO!

Los 3 extremos en tres dimensiones de silicona de superficie suave abrazan la banda matriz al diente. El deslumbramiento se elimina completamente y de esta forma se disminuye el tiempo de terminado. Ningún sistema seccional se adapta mejor ni proporciona restauraciones más precisas.

MÁXIMA SEPARACIÓN

Un núcleo firme en el centro de cada extremo suave y adaptable dirige la tensión del anillo a nivel interproximal en donde se necesita una mayor y más eficaz separación entre los dientes.

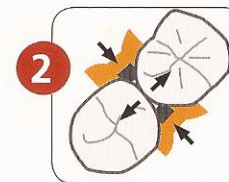

FÁCIL Y RÁPIDO DE COLOCAR

La parte inferior con muescas del anillo se adapta directamente sobre la cuña simplificando su colocación y permitiendo el ajuste de la cuña.

AJUSTES FÁCILES Y AMPLIOS

Los extremos del Soft Face™ 3D-Ring, son mas amplios que los anillos separadores estándares y por lo tanto permiten que se coloque en espacios más amplios.

MAYOR RESISTENCIA A LARGO PLAZO

El moldeado reforzado permite mayor tensión y longevidad del anillo, además permite una mayor separación que dura restauración tras restauración. Ambos modelos de anillos del sistema 3D se esterilizan perfectamente en autoclave.

