

# polaoffice+

SISTEMA DE BLANQUEAMIENTO DENTAL DE APLICACIÓN EN EL CONSULTORIO

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS

INSTRUCCIONES

CÓDIGO DE PEDIDO



## El blanqueamiento más rápido del mundo\*\*

Requiere de un tiempo mínimo en la unidad dental. El tratamiento total tomará menos de 30 minutos. Un menor tiempo en la unidad dental aumentará la comodidad y satisfacción del paciente; asimismo, mejorará su productividad y rentabilidad. La fórmula única de peróxido de hidrógeno al 37.5% garantiza la rápida liberación de iones de peróxido para dar inicio al proceso de blanqueamiento.



### No necesita lámpara de blanqueamiento

Se puede utilizar Pola Office+ con o sin lámpara de blanqueamiento, ya que no requiere de activación. Si desea impresionar a sus pacientes y acelerar el proceso de blanqueamiento, claro que puede utilizar una lámpara de blanqueamiento o una lámpara de fotocurado que emita calor estándar. Sin embargo, no es necesario utilizarla.

### Máxima comodidad

Pola Office+ con pH neutro garantiza una máxima comodidad durante y después del tratamiento. El tiempo mínimo del tratamiento producirá menos malestar y menor sensibilidad al paciente.

### Desensibilizante integrado

No requiere la aplicación de un desensibilizante por separado. Pola Office+ contiene propiedades desensibilizantes únicas integradas, las cuales inhiben la sensibilidad post-operatoria. El nitrato de potasio, ingrediente clave que reduce el dolor, penetra en los extremos del nervio bloqueando la transmisión de impulsos nerviosos sensibles, lo cual permite proporcionar un efecto calmante.

### Simple aplicación

No necesita mezclarse. El sistema de jeringa con doble cilindro, mezcla el contenido a medida que se aplica el gel directamente en el diente. Esto garantiza una mezcla consistente del gel frescamente activado. La punta fina del aplicador permite una fácil aplicación, especialmente en las partes estrechas.

### Solo una capa fina

Todo lo que se requiere es una fina capa de gel. Utilice la punta de aplicación para distribuir el gel, asegurándose que todas las superficies del diente queden cubiertas. La fórmula pegajosa del gel se adhiere firmemente a las superficies del diente aumentando el efecto de blanqueamiento.

“89% de los evaluadores recomendarían Pola Office+ a un colega!”

“83% de los evaluadores comprarían Pola Office+<sup>†</sup>”